

San
Ditan®

Aluminium-Spray

Nanijeti na ranu
(Zavoj u spreju)



Animal care





SASTAV

Etil acetat, poli-izobutil metakrilat, aluminijski prah, bijelo mineralno ulje, butan kao potisni plin.

Nezaštićene, otvorene rane mogu se vrlo brzo i lako inficirati. Primjenom Alumijijum spreja ranu prekrivamo elastičnim zaštitnim slojem koji omogućava prolaz zraka, tako da rana može disati. nadalje, sprječava prljanje rane i štiti od drugih štetnih utjecaja.

Obzirom na lakoću primjene moguće je zaštititi i teško dostupne rane.

SAVIJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Dobro protresti prije primjene.

Sprej nježno nanositi na ranu sa udaljenosti 20 - 25 cm kroz 1 - 2 sekunde. U slučaju potrebe ponoviti nekoliko puta na dan.

VELIČINA PAKOVANJA

Sprej boca (aerosol) od 200 mL

Veyx-Pharma is GMP- and QS-certified.